

---

## Gebrauchsanweisung

### Elgso Bettalarmmatte

---



## 1. Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch der Elgso Elektronik Bettalarmmatte muss diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

### *Hinweise für das Pflegepersonal*

- Die Elgso Bettalarmmatte dient lediglich zur Unterstützung des Pflegepersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz ist die Elgso Elektronik Bettalarmmatte auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
- Die elektrische Montage und Inbetriebnahme des Produkts darf nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. ESD-Schutz beachten.

## 2. Produktbeschreibung

### 2.1 Funksystem:

Elgso Elektronik Bettalarmmatte ist mit einem Funksender ausgestattet, der kompatibel zu allen gängigen Elgso Elektronik Funkempfängern ist. Es ist möglich verschiedene Funkgestützte Assistenzsysteme mittels eines Funkempfängers zu nutzen. (Bitte Reichweite beachten) Elgso Elektronik Funksender empfangen die Signale und leiten sie an eine kabelgebundene Rufanlage weiterleiten.

Die Sensibilität der Sensorik lässt sich so einstellen, dass die Person entweder das Bett für die Alarmlösung ganz verlassen muss oder lediglich auf der Bettkante sitzt.

### 2.2 Anwendungsbereiche

Elgso Elektronik Bettalarmmatte wurde vorwiegend für den Einsatz in Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern und Psychiatrien entwickelt um die dort notwendige Pflege und Beaufsichtigung von demenzten und Sturzgefährdeten zu unterstützen.

## 3. Reinigung & Desinfektion

- Bettalarmmatte kann mit handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln mit max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden.
- Keine ätzenden Mittel verwenden
- Bettalarmmatte trocken und sauber bei 0°C bis + 55°C lagern.

## 4. Wartung und Fehlersuche

Elgso Elektronik Bettalarmmatte ist bis auf Batteriewechsel wartungsfrei. Sollte die Funktion trotzdem nicht gewährleistet sein, ist folgendes zu prüfen:

- Ist ein kompatibler Elgso Elektronik Rufempfänger im Betrieb und richtig angeschlossen
- Ist die Bettalarmmatte korrekt auf den Rufempfänger eingelernt?

Sind die erwähnten Punkte erfüllt, aber die Funktionen des Actilog ist trotzdem nicht gewährleistet, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal.

## 5. Entsorgung

Der Funksender und die dazugehörige Batterie sind bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben, die dafür sorgt, dass die Bauteile recycelt, behandelt und umweltverträglich entsorgt werden. Weitere Informationen zu den für Sie erreichbaren Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem Abfallentsorger.

## 6. Technische Daten

Artikel	Bettalarmmatte	Lebensdauer	Je nach Anwendung ca. 5 Jahre
Masse (LxBxH)	120/80x1 cm	Funkreichweite	150 m (im freien Feld) 30 m (im Gebäude)
Gewicht (kg)	1,5 Kg	Batterietyp	1xCR 2032, 3V
Oberfläche	versiegelt	Schutzart	IP 64
Personengewicht	min. 30kg max. 120kg	Umgebungstemperatur	0 bis+55° C
Chemische Beständigkeit	Wasser (Raumtemperatur), Körperflüssigkeiten, handelsübliche Desinfektionsmittel, max. 70 Vol% Alkohol		

(Änderungen vorbehalten)



## ELGSO Elektronik UG

Mainstr. 1  
45478 Mülheim an der Ruhr

Tel: 0208 / 82 18 25 34  
Fax: 0208 / 82 18 25 36

[www.elgso-elektronik.de](http://www.elgso-elektronik.de)  
[info@elgso-elektronik.de](mailto:info@elgso-elektronik.de)